


2GL-MAMR

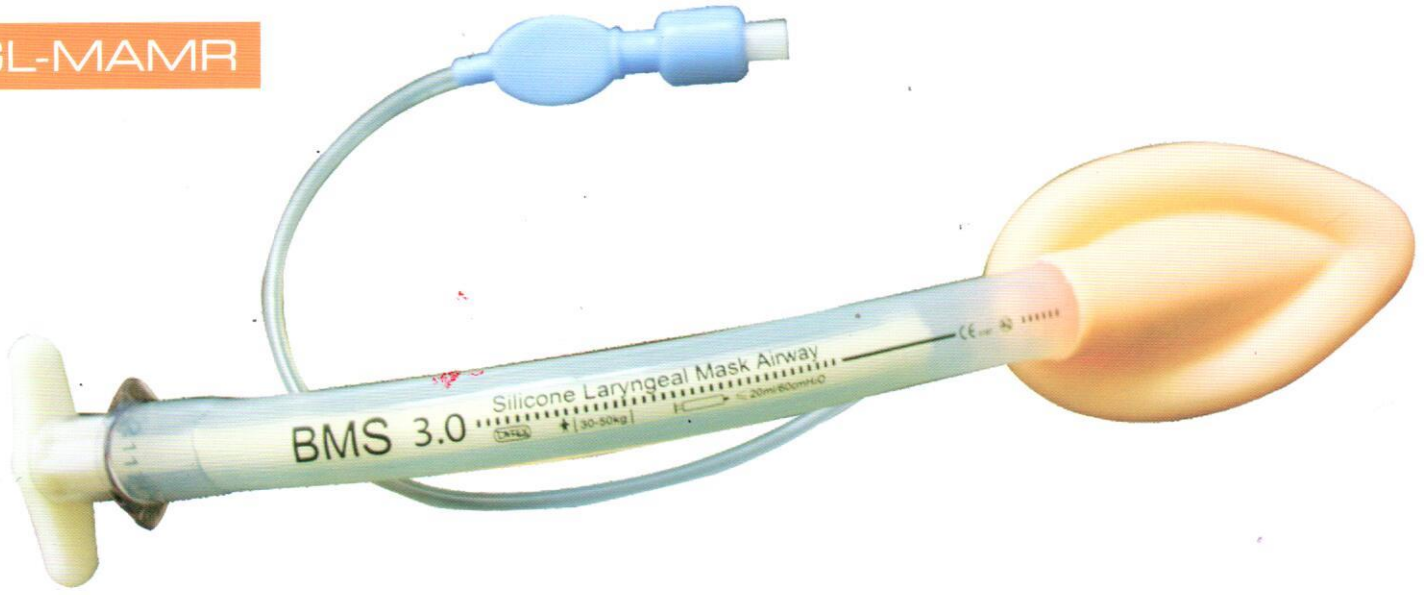

Numara	Hasta Vücut Ağırlığı	Uygulanacak Maximum Hava Enjeksiyonu
No.1	0-5 Kg kadar olan bebeklerde	4 ml
No.1,5	5-10 Kg kadar olan bebeklerde	7 ml
No.2	10-20 Kg bebek ve çocuklarda	10 ml
No.2,5	20-30 Kg çocuklarda	14 ml
No.3	30-50 Kg yetişkinlerde	20 ml
No.4	50-70 Kg arası yetişkinlerde	30 ml
No.5	70-100 Kg arası yetişkinlerde	40 ml

DUAL CHANNEL PERORAL LARENKS MASK (REUSABLE) 2G-SİMPLE

Cihaz hipofarenksin şekline uygun ve larinksisi bir conta gibi kapatan minyatür bir silikon maske ve buna 30 derecelik açı ile birleşmiş silikon bir tüpten oluşur. Maskenin çevresinde şişirilebilir eliptik bir hava yastığı vardır

- Laringoskop kullanmadan uygulanabilen bir cihazdır.
- Hasta güvenliği açısından tamamı Medikal Silikondan üretilmiştir Latex ,PVC ve kanserojen madde dehp içermez bu husus TÜBİTAK,ve sağlık bakanlığınca belgelenmiştir.
- Çok kullanımlık bir cihazdır.Buhar otoklavında 134 °C' de 4-6 dakikada, E.O. otoklavında veya sıvı kimyasallarla steril edilerek kullanılabilir. En az 40 defaya kadar kullanım garantisi altındadır.
- Konnektor ucunda ve ambalajında seri numarı bulunup birbirleri ile aynıdır.
- Kafın ucunda şişirmeye yarayacak kaf şişirme valfina sahip olup ve her türlü enjektörle hava sağlayacak yapıdadır. KAF İÇİNDE BULUNAN HAVALANDIRMA DELİĞİNİN SEKRESYONU TUTMASI İÇİN 3 GÖZENEĞİ bulunur.
- Parmak kullanmayı tercih etmeyen uygulayıcılar için hava yolu tüpün içine yerleştirilebilen bir yerleştirme aparatına sahiptir şekil alabilen bu yerleştirme aparatı cihazı hasta anatomisine uygun eğri bir konuma getirir ve hastaya rahat bir şekilde yerleştirme imkanı sağlar.
- Ürününün kapnografa bağlanmayı sağlayan 15 mm'lik standart konnektöre sahiptir..